

REF	CONTENT		Αναλυτές στους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα cobas c pack
05422485 190	EcoTergent* (60 mL)	Κωδικός συστήματος 07 6946 1	Roche/Hitachi cobas c 311

*Η τιμή που έχει κωδικοποιηθεί στις ρυθμίσεις του αναλυτή είναι 55.9 mL και αποτελεί τον νεκρό όγκο των φιαλιδίων.

Ελληνικά**Πληροφορίες συστήματος**

ECO-D: ACN 946

Προοριζόμενη χρήση

Το EcoTergent προστίθεται στο λουτρό αντίδρασης ώστε να μειώσει την επιφανειακή τάση στα συστήματα **cobas c** 311.

Περίληψη

Το EcoTergent προστίθεται στο λουτρό αντίδρασης. Λειτουργεί ως επιφανειοδραστικός παράγοντας και προστίθεται με στόχο την ελαχιστοποίηση των φυσαλίδων που θα μπορούσαν δυνητικά να παρεμβληθούν κατά τη λήψη μετρήσεων του φωτόμετρου.

Αντιδραστήρια – διαλύματα εργασίας

Απορρυπαντικό

Το απορρυπαντικό βρίσκεται στη θέση Β και C.

Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις

Για in vitro διαγνωστική χρήση.

Να τηρούνται οι συνήθεις προφυλάξεις οι οποίες απαιτούνται κατά τον χειρισμό όλων των εργαστηριακών αντιδραστηρίων.

Η απόρριψη όλων των αποβλήτων θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Διατίθεται, κατόπιν αιτήσεως, φύλλο δεδομένων ασφάλειας για επαγγελματίες χειριστές.

Για τις Η.Π.Α.: Χορηγείται αποκλειστικά με ιατρική συνταγή.

Το κιτ περιέχει συστατικά ταξινομημένα ως εξής σύμφωνα με την οδηγία (ΕΚ) αρ. 1272/2008:

**Προειδοποίηση**

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Πρόληψη:

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P280 Να φοράτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

Ανταπόκριση:

P362 + P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Οι ετικέτες ασφάλειας του προϊόντος ακολουθούν πρωτίστως τις οδηγίες GHS της ΕΕ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: για όλες τις χώρες: +49-621-7590, για τις Η.Π.Α.: 1-800-428-2336

Χειρισμός των αντιδραστηρίων

Έτοιμο προς χρήση

Φύλαξη και σταθερότητα

Φυλάξτε το προστατευμένο από το φως.

Διάρκεια ζωής σε θερμοκρασία 15-25 °C: Δείτε την ημερομηνία λήξης στην ετικέτα του **cobas c** pack.

Στον αναλυτή, κατά τη χρήση, ψυχόμενο: 4 εβδομάδες

Παρεχόμενα υλικά

Για τα αντιδραστήρια, δείτε την ενότητα "Αντιδραστήρια - διαλύματα εργασίας".

Απαιτούμενα υλικά που δεν παρέχονται

Δείτε την ενότητα "Πληροφορίες παραγγελιών"

Ανάλυση

Χρησιμοποιείτε το EcoTergent όπως ορίζεται στις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.

Σε αυτό το φύλλο μεθόδου χρησιμοποιείται πάντοτε μια τελεία (στιγμή) ως υποδιαστολή, προκειμένου να σηματοδοτεί το όριο μεταξύ του ακέραιου και του κλασματικού μέρους ενός δεκαδικού αριθμού. Δεν χρησιμοποιούνται τελείες ως διαχωριστικά στις χιλιάδες.

Σύμβολα

Η Roche Diagnostics χρησιμοποιεί τα ακόλουθα σύμβολα και σήματα πέραν αυτών που παρατίθενται στο πρότυπο ISO 15223-1.

CONTENT

Περιεχόμενο του κιτ



Όγκος μετά από ανασύσταση ή ανάμιξη

GTIN

Διεθνής Κωδικός Μονάδας Εμπορίας



Οι προσθήκες, οι διαγραφές ή οι αλλαγές υποδεικνύονται από μια λωρίδα υπόδειξης αλλαγής στο περιθώριο.
© 2015, Roche Diagnostics



Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com

Διανομή στις Η.Π.Α.:

Roche Diagnostics, Indianapolis, IN

US Customer Technical Support 1-800-428-2336

