



06766617001V3.0

# Cell Wash Solution I / NaOH-D

**cobas**<sup>®</sup>

Καθαριστικό CellCln1/Απορρυπαντικό 1

Πληροφορίες παραγγελιών

REF	CONTENT	Αναλυτές στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το kit
04880285 190	Cell Wash Solution I/NaOH-D (2 x 1.8 L)	Roche/Hitachi MODULAR Roche/Hitachi <b>cobas c</b>

**Ελληνικά****Προοριζόμενη χρήση**

Το Cell Wash Solution I / NaOH-D χρησιμοποιείται ως αλκαλικό διάλυμα έκπλυσης για κυβελίδες αντίδρασης στα συστήματα Roche/Hitachi.

**Περίληψη**

Απαιτούνται εκπλύσεις ρουτίνας για τις κυβελίδες αντίδρασης (κυβέττες) λόγω πιθανής αλληλεπίδρασης από άλλα μίγματα αντιδραστηρίων/δειγμάτων. Αυτή η διαδικασία διατηρεί την ακεραιότητα των αποτελεσμάτων για τα δείγματα ασθενών.

**Αντιδραστήρια – διαλύματα εργασίας**

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 1 mol/L, 4 %, απορρυπαντικό

**Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις**

Για in vitro διαγνωστική χρήση.

Να τηρούνται οι συνθήκες προφυλάξεως οι οποίες απαιτούνται κατά τον χειρισμό όλων των εργαστηριακών αντιδραστηρίων.

Η απόρριψη όλων των αποβλήτων θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Διατίθεται, κατόπιν αιτήσεως, φύλλο δεδομένων ασφάλειας για επαγγελματίες χειριστές.

Για τις Η.Π.Α.: Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία περιορίζει την πώληση του προϊόντος αυτού μόνο σε ιατρούς ή κατόπιν εντολής ιατρού.

Το kit περιέχει συστατικά ταξινομημένα ως εξής σύμφωνα με την οδηγία (ΕΚ) αρ. 1272/2008:



Κίνδυνος

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

**Αποτροπή:**

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

**Αντίδραση:**

P301 + P330 + P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

P304 + P340 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα και αφήστε το σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / ένα γιατρό.

P305 + P351 + P338 + P310 ΕΑΝ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν ιατρό.

P390 Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.

Η επισήμανση ασφάλειας του προϊόντος τηρεί τις οδηγίες GHS της Ε.Ε.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: για όλες τις χώρες: +49-621-7590, για τις Η.Π.Α.: 1-800-428-2336

**Χειρισμός του αντιδραστηρίου**

Έτοιμο προς χρήση

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Με την πάροδο του χρόνου, ενδέχεται να παρατηρηθεί στον πυθμένα του φιαλιδίου ελαφρύς αποχρωματισμός ή μικρά σωματίδια. Ο αποχρωματισμός και τα σωματίδια δεν επηρεάζουν την απόδοση του αντιδραστηρίου.

**Φύλαξη και σταθερότητα**

Διάρκεια ζωής Δείτε την ημερομηνία λήξης στις επικέτες.

σε θερμοκρασία 15-25 °C:

10 εβδομάδες

Σταθερότητα στον αναλυτή:

**Παρεχόμενα υλικά**

Για τα αντιδραστήρια, δείτε την ενότητα "Αντιδραστήρια - διαλύματα εργασίας".

**Απαιτούμενα υλικά που δεν παρέχονται**

Δείτε την ενότητα "Πληροφορίες παραγγελιών"

Αναλυτές Roche/Hitachi και αντιδραστήρια ανάλυσης.

Δείτε τις κατάλληλες οδηγίες χρήσης και το εγχειρίδιο χρήσης για τα πρόσθετα απαιτούμενα υλικά.

**Ανάλυση**

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του συγκεκριμένου αναλυτή, στα αντίστοιχα φύλλα εφαρμογών και φύλλα μεθόδου όλων των απαραίτητων συστατικών.

Σε αυτό το φύλλο μεθόδου χρησιμοποιείται πάντοτε μια τελεία (στιγμή) ως υποδιαστολή, προκειμένου να σηματοδοτεί το όριο μεταξύ του ακέραιου και του κλασματικού μέρους ενός δεκαδικού αριθμού. Δεν χρησιμοποιούνται τελείες ως διαχωριστικά στις χιλιάδες.

**Σύμβολα**

Η Roche Diagnostics χρησιμοποιεί τα ακόλουθα σύμβολα και σήματα πέραν αυτών που παρατίθενται στο πρότυπο ISO 15223-1 (για τις Η.Π.Α.: βλέπε <https://usdiagnostics.roche.com> για τον ορισμό των συμβόλων που χρησιμοποιούνται):

**DETERGENT 1** Απορρυπαντικό 1

**CONTENT** Περιεχόμενα του kit

**REAGENT** Αντιδραστήριο

**CALIBRATOR** Βαθμονομητής



Όγκος μετά την ανασύσταση ή την ανάμιξη

**GTIN**

Διεθνής Κωδικός Μονάδας Εμπορίας

Οι προσθήκες, οι διαγραφές ή οι αλλαγές υποδεικνύονται από μια λωρίδα υπόδειξης αλλαγής στο περιθώριο.

© 2017, Roche Diagnostics



Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim  
[www.roche.com](http://www.roche.com)

Διανομή στις Η.Π.Α.:  
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN  
US Customer Technical Support 1-800-428-2336

