

## Πληροφορίες παραγγελιών

REF	CONTENT	Αναλυτές στους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα kit
04880277 190	Multiclean (2 x 2 L)	Roche/Hitachi <b>cobas c</b>
04708725 190	Sample Cleaner 1 (SmpCln1) (12 x 59 mL)	Roche/Hitachi <b>cobas c</b> 311/501
05352991 190	Sample Cleaner 1 (SmpCln1) (12 x 20 mL)	Roche/Hitachi <b>cobas c</b> 502/701/702 Roche/Hitachi <b>cobas c</b> 513

## Ελληνικά

## Προοριζόμενη χρήση

Διάλυμα έκπλυσης πιπετών δειγματος, στα συστήματα Roche/Hitachi **cobas c**.

## Περίληψη

Ενδέχεται να απαιτούνται εκπλύσεις πιπετών δειγματος λόγω πιθανής αλληλεπίδρασης από άλλα δείγματα. Οι ειδικές αυτές εκπλύσεις διατηρούν την ακεραιότητα του δειγματος.

## Αντιδραστήρια – διαλύματα εργασίας

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 1 mol/L

## Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις

Για in vitro διαγνωστική χρήση.

Να τηρούνται οι συνήθεις προφυλάξεις οι οποίες απαιτούνται κατά τον χειρισμό όλων των εργαστηριακών αντιδραστηρίων.

Η απόρριψη όλων των αποβλήτων θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Διατίθεται, κατόπιν απήσεως, φύλλο δεδομένων ασφάλειας για επαγγελματίες χειριστές.

Για τις Η.Π.Α.: Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία περιορίζει την πώληση του προϊόντος αυτού μόνο σε ιατρούς ή κατόπιν εντολής ιατρού.

Το kit περιέχει συστατικά ταξινομημένα ως εξής σύμφωνα με την οδηγία (ΕΚ) αρ. 1272/2008:



## Κίνδυνος

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

## Πρόληψη:

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

## Ανταπόκριση:

P301 + P330 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P303 + P361 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα και αφήστε το σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / ένα γιατρό.

P305 + P351 + P338 ΕΑΝ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν ιατρό.

P390 Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.

Η επισήμανση ασφάλειας του προϊόντος τηρεί τις οδηγίες GHS της Ε.Ε. Τηλέφωνο επικοινωνίας: για όλες τις χώρες: +49-621-7590, για τις Η.Π.Α.: 1-800-428-2336

## Χειρισμός των αντιδραστηρίων

Έτοιμο προς χρήση

## Σημείωση

Με την πάροδο του χρόνου, ενδέχεται να παρατηρηθεί στον πυθμένα του φιαλιδίου ελαφρύς αποχρωματισμός ή μικρά σωματίδια. Ο αποχρωματισμός και τα σωματίδια δεν επηρεάζουν την απόδοση του αντιδραστηρίου.

## Φύλαξη και σταθερότητα

Διάρκεια ζωής σε θερμοκρασία 15-25 °C: Δείτε την ημερομηνία λήξης στις ετικέτες

## 04708725 190

Στον αναλυτή, κατά τη χρήση:

4 εβδομάδες

## 05352991 190

Στον αναλυτή, κατά τη χρήση:

2 εβδομάδες

## 04880277 190

Μετά το άνοιγμα:

12 εβδομάδες

Φυλάξτε το Multiclean κλεισμένο όταν δεν χρησιμοποιείται.

Στον αναλυτή **cobas c**, κατά τη χρήση:

4 εβδομάδες

## Παρεχόμενα υλικά

Για τα αντιδραστήρια, δείτε την ενότητα "Αντιδραστήρια - διαλύματα εργασίας".

## Απαιτούμενα υλικά που δεν παρέχονται

Δείτε την ενότητα "Πληροφορίες παραγγελιών"

Αναλυτές Roche/Hitachi και αντιδραστήρια ανάλυσης.

Δείτε το κατάλληλο φύλλο μεθόδου και τα εγχειρίδια χρήσης για τα πρόσθετα απαιτούμενα υλικά.

## Ανάλυση

Χρησιμοποιήστε το Multiclean / Sample Cleaner 1 όπως καθορίζεται στις οδηγίες χρήσης των αντίστοιχων αντιδραστηρίων συστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του συγκεκριμένου αναλυτή, στα αντίστοιχα φύλλα εφαρμογών και φύλλα μεθόδου όλων των απαραίτητων συστατικών.

Σε αυτό το φύλλο μεθόδου χρησιμοποιείται πάντοτε μια τελεία (στιγμή) ως υποδιαστολή, προκειμένου να σηματοδοτεί το όριο μεταξύ του ακέραιου και του κλασματικού μέρους ενός δεκαδικού αριθμού. Δεν χρησιμοποιούνται τελείες ως διαχωριστικά στις χιλιάδες.


## Σύμβολα

Η Roche Diagnostics χρησιμοποιεί τα ακόλουθα σύμβολα και σήματα πέραν αυτών που παρατίθενται στο πρότυπο ISO 15223-1 (για τις Η.Π.Α.:

# Multiclean / Sample Cleaner 1

**cobas**<sup>®</sup>

βλέπε <https://usdiagnostics.roche.com> για τον ορισμό των συμβόλων που χρησιμοποιούνται):

<b>CONTENT</b>	Περιεχόμενα του κιτ
<b>REAGENT</b>	Αντιδραστήριο
<b>CALIBRATOR</b>	Βαθμονομητής
	Όγκος μετά την ανασύσταση ή την ανάμιξη
<b>GTIN</b>	Διεθνής Κωδικός Μονάδας Εμπορίας

Οι προσθήκες, οι διαγραφές ή οι αλλαγές υποδεικνύονται από μια λωρίδα υπόδειξης αλλαγής στο περιθώριο.  
© 2017, Roche Diagnostics



Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim  
[www.roche.com](http://www.roche.com)

Διανομή στις Η.Π.Α.:  
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN  
US Customer Technical Support 1-800-428-2336

